



Brugervejledning

# MASKE

- til MED LINE Latox  
50% Lattergas og 50% Oxygen

## SÅDAN SAMLES MASKEN

I denne folder viser vi, hvordan du samler den maske, der bruges til inhalation af Latox.

På siden overfor kan du se de 8 dele masken består af.

Strandmøllen A/S anbefaler at bruge masken sammen med MED LINE Latox fra Strandmøllen A/S.


MED LINE Latox består af 50 % Oxygen og 50 % Lattergas og er velegnet til analgesi af børn og patienter der har behov for lettere smertelindring.

Læs mere om Latox på bagsiden.



## OVERSIGT

Her er en oversigt over de 8 dele der skal samles inden ibrugtagning.

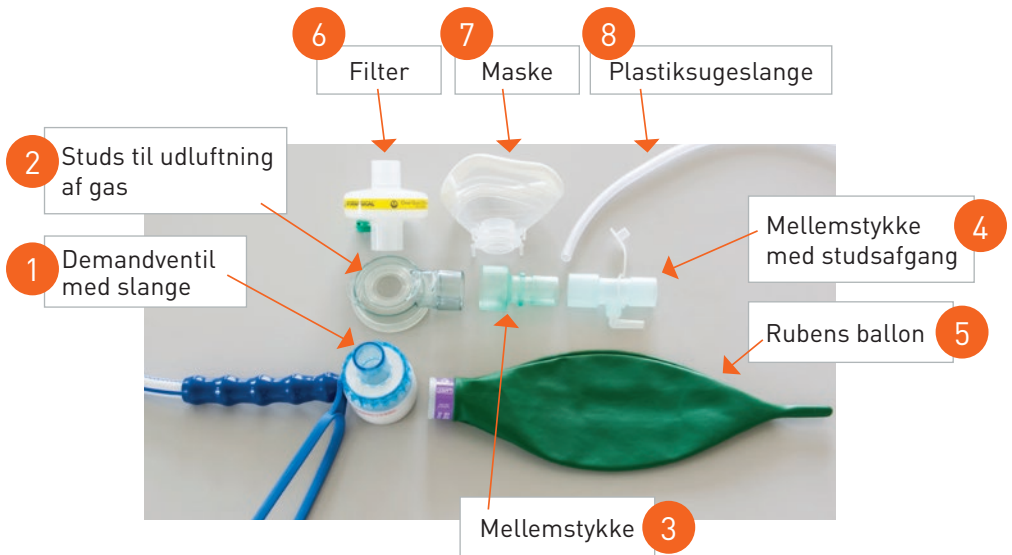

Alle delene kommer enkeltvis i forseglede poser og er engangsudstyr. Kun **Demandventilen med slange** 1 er flergangsudstyr.

1. **Studs til udluftning af gas** <sup>2</sup> sættes på **Demandventilen** <sup>1</sup>



2. **Mellemstykket** <sup>3</sup> skubbes over sideudtaget på **Studs til udluftning af gas** <sup>2</sup>  
Den passer kun på én måde.





3. **Mellemstykket med studsafgang**<sup>4</sup> sættes på **Mellemstykket**<sup>3</sup>  
Den passer kun på én måde.



4. **Rubens ballon**<sup>5</sup> sættes på **Mellemstykket med studsafgang**<sup>4</sup>



5. **Filteret**<sup>6</sup> sættes ned over **Studs til udluftning af gas**<sup>2</sup>

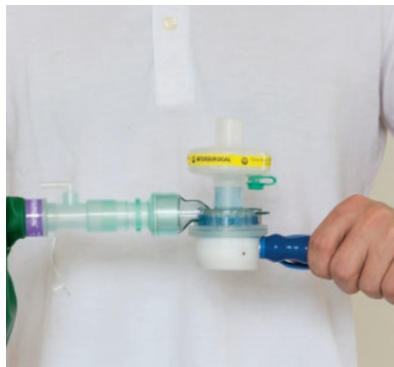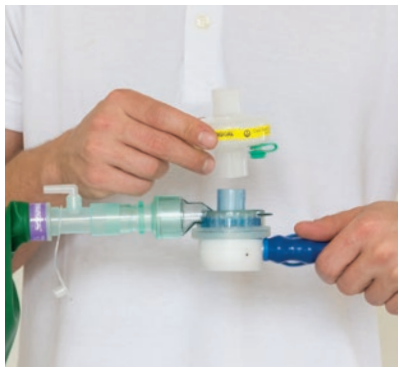

6. **Masken**<sup>7</sup> sættes ned over **Filteret**<sup>6</sup>



7. **Plastiksugeslangen** <sup>8</sup> sættes på **Mellemstykket med studsafgang** <sup>4</sup>



8. Tag sikkerhedssplitten ud af flaskens koblingsventil, og tilslut slangen.



9. Nu er alt monteret og du kan åbne for gassen.



---

## MED LINE LATOX

MED LINE Latox er velegnet til analgesi af børn og patienter der har behov for lettere smertelindring.

MED LINE Latox indeholder 50 % Oxygen og 50 % Lattergas. Den tilsatte Oxygen mindsker risikoen for overdosering af lattergas. Derudover har oxygen den effekt, at lattergassens virkning hurtigere aftager, samt mindsker eventuelle bivirkninger hos patienten.

Gasflasken med MED LINE Latox, er udstyret med en KVIK-TOP med integreret ventil og manometer. Den integrerede ventil sikrer hurtig og problemfri tilslutning til flasken, og manometeret viser hvor meget Latox, der er i flasken. Dermed slipper man for at bruge en ekstern ventil.

MED LINE Latox kommer i 5 liters flasker, som er en lille flaske, der er let at håndtere.

### Masken:

Du kan købe alle delene til masken hos Strandmøllen A/S. Ring på telefon 70 10 21 07 og så finder vi det rette udstyr og gasflasker du har brug for.

### STRANDMØLLEN A/S

STRANDVEJEN 895  
DK - 2930 KLAMPENBORG

TELEFON 701 02 107  
FAX 701 03 107

A/S REG. NR. 188.220  
CVR. NR. 13 91 30 72

[www.strandmollen.dk](http://www.strandmollen.dk)