



SAMLEVEJLEDNING

Inhalationsudstyr til MED LINE® Latox
50% lattergas og 50% oxygen

I denne folder viser vi, hvordan du samler udstyret, der bruges til behandling med Latox.

Strandmøllen anbefaler, at bruge udstyret sammen med MED LINE® Latox fra Strandmøllen A/S.

SÅDAN SAMLES UDSTYRET

HER ER EN OVERSIGT OVER DE DELE, DER SKAL SAMLES INDEN ANVENDELSE:



Demandventil,
slange og diverter



Maske



Bakteriefilter

*Alle delene kommer enkeltvis i forseglede poser, og er engangsudstyr.
Kun demandventilen med slange og diverter er flergangsudstyr.*



1.

Start med at samle inhalations udstyret. Tag demandventilen op og påsæt bakteriefilteret på diverteren



2.

Sæt masken på udstyret



3.

Fjern plomberingen på flasken



4.

Sæt nipplens i koblingen



5.

Drej over på plus for at åbne for flasken



6.

Udstyret er klar til anvendelse.
Husk at slukke for gassen efter brug

TIL BEHANDLING SKAL DU BRUGE

ECO-maske nr. 2
ECO-maske nr. 3
ECO-maske nr. 4
Breathing Filter
DV Ease II o2/N2o

varenr. 1513000 25 stk.
varenr. 7293000 35 stk.
varenr. 7294000 35 stk.
varenr. 1544000 25 stk.
varenr. 0715306 25 stk.

l./min.	l.
2	3
5m	3t 20m 2t
2m	1t 30m 1t 30m
m	1t 40m 1t
	50m



ESSENTIEL FOR FREMTIDEN

Hos strandmøllen får du
mere end bare gas

Du får løsninger, som gør en forskel hver gang, vi bliver klogere, siger tak for mad, ser græsset gro, finder nye veje, smelter sammen, og trækker vejret. Du møder fagfolk, som med omtanke, erfaring, viden og passion forstår kompleksiteten i din hverdag, og som med den sikreste hånd kan gøre en forskel i sundhedsvæsenet, farmaindustrien, jern- og maskinindustrien, fødevarer- industrien, i laboratorierne, for udvikling af ny energi og vores fælles bæredygtige fremtid.

STRANDMØLLEN A/S
Strandvejen 895
DK-2930 Klampenborg

Tlf. 701 02 107
www.strandmollen.dk
kundeservice@strandmollen.dk

STRANDMØLLEN